

バイコンインプラントを他院で埋入された患者様への再補綴などメンテナンスされる方へ

このたびは弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

弊社システムは他社システムとは異なりインプラントとアバットメントの結合部分にネジを使用しておらずロックングテーパーで圧入するタイプでございます。

従いまして、アバットメント交換の際などアバットメントを除去される際は回転を加えて上に引っ張る力を加えますと除去が可能です。

こちらに関しては以下補綴マニュアル P. 25 に除去方法が記載されております。

●補綴マニュアル

https://www.bicon.co.jp/pdf/201405_RT.pdf

逆にインプラントとアバットメントを結合する際にはマレットで圧入いたします。

こちらに関しては弊社サージカルマニュアル P. 26 に装着方法が記載されております。

●サージカルマニュアル

https://www.bicon.co.jp/pdf/202407_Bicon_Surgical_Manual_JP.pdf

また、先生のご希望の方法により必要パーツが異なりますので一度補綴マニュアルをご確認くださいようお願い申し上げます（補綴処置のフローチャートが補綴マニュアル 3. 4 ページに掲載しております。こちらの表をご参考いただければと思います。）。

アバットメント適応サイズに関しましてもこちらの補綴マニュアルの P. 10 に記載がございますので併せてご確認くださいませ。

なお、アバットメントの種類は以下弊社カタログよりご確認くださいませ。

●バイコンデンタルインプラント製品カタログ

https://www.bicon.co.jp/pdf/2022_09.pdf

・インプラント内径によりご選択のアバットメントポストサイズが変わってまいります。例えば内径 3 mm のインプラントには 3 mm ポストのアバットメントをご選択いただきます。

・ノンショルダーアバットメントとステルスアバットメントの違いとしては、ステルスアバットメントはショルダーがありますので、削合は不要です。ノンショルダーは削合してショルダーを形成します。

・アバットメントを立てていただいた後は天然歯の印象と同様に印象をとっていただけます。

・ユニバーサルアバットメント（UA）とは、スキャンポストを使用して、ソフトのライブラリから選択、プランニングが可能です。

・2次オペを行える補綴キットのお貸出しは無料で行わせていただきます。（他院様にお貸出しさせていただいている期間は在庫切れの場合もございますのでご使用日よりお早めにご用命いただければと存じます。）

・インプラントレベル印象採得の場合は印象採得後、最終補綴物のサイズに近いテンポラリーアバットメントまたは最終アバットメントを最終補綴物作成まで装着されておくと余剰歯肉や余剰骨が被らなく最終補綴を装着しやすくなります。

またその方法以外ではインプラント内溝部分をそのままにされておくより黒いヒーリングプラグをカットして装着しておくことが望ましいです。

・もし元々装着されていたアバットメントより今回再作成される補綴物のアバットメントの直径の方が大きい場合は、装着されるアバットメントの直径サイズのサルカスフォーマー（リーマー）*を装着前に必ずご使用ください。サルカスフォーマーのご使用方法はサージカルマニュアル P. 16 に掲載がございます。

*サルカスフォーマー（リーマー）はお貸出し器材の補綴キットに含まれております。

その他アバットメントのサイズの詳しいご相談など症例ご相談がおありの場合は以下テクニカルサポートフォームよりレントゲン写真などご相談内容をご連絡いただきましたら内容に応じてクリニカルアドバイザーに確認の上的確に回答させていただきますので是非ご活用ください。

●テクニカルサポートフォーム

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDc0TmidAN92TsBbb-HyGpEJJpsb20ShcckqdU8uA9KJaBwA/viewform>

なお、現在類似インプラントがありバイコンインプラントが埋入された患者様をご来院されたところのご相談の際にレントゲン写真を拝見すると実際はバイコンインプラントではなかったというケースが数件ございます。もし本当にバイコンインプラントが埋入されているかどうかご不安でいらっしゃいましたら先ほどのテクニカルサポートフォームよりレントゲン写真をご送信いただければと存じます。

サージカルマニュアル・補綴マニュアル・価格が掲載されているカタログなど弊社から資料を一式送付することも可能でございますので以下の資料請求フォームよりご用命ください。

●資料請求フォーム

https://www.bicon.co.jp/cgi-bin/form_request/index.cgi

よろしくお願ひ申し上げます。